

Ersatzteilliste

SPRING




SPRING VARIO




SPRING CROSS COUNTRY



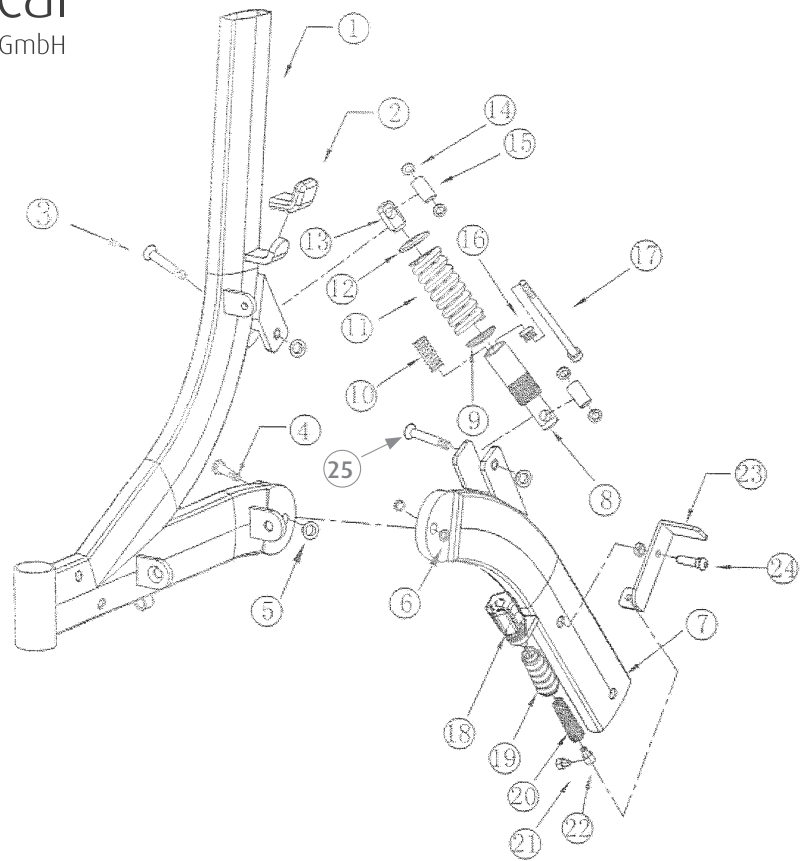


Rahmen ROLLATOR SPRING

Nr.	Art. - Nr.	Beschreibung
02	SPR - 11	Auflagengummi
03, 08-17	SPR - 12	Federeinheit für Spring
18	SPR - 13	Einstellmutter Feststellbremse für Spring
19-22	SPR - 14	Feder und Abdeckung Feststellbremse für Spring
18-24	SPR - 15SL	Bremse links mit allen Teilen für Spring
18-24	SPR - 15SR	Bremse rechts mit allen Teilen für Spring
03, 04, 25	SPR - 19	Reparatursatz Schwinge rechts und links für Spring
o. Abb.	SPR - 18L	Scheibenbremsen links für Spring Cross Country
o. Abb.	SPR - 18R	Scheibenbremsen rechts für Spring Cross Country
	SPR - 10 - 49 - 4L	Rahmen Spring links, bordeauxrot metallic mit Hinterradausleger und Federeinheit
	SPR - 10 - 49 - 4R	Rahmen Spring rechts, bordeauxrot metallic mit Hinterradausleger und Federeinheit
	SPR - 10 - 49 - 8L	Rahmen Spring links, graphitgrau metallic mit Hinterradausleger und Federeinheit
	SPR - 10 - 49 - 8R	Rahmen Spring rechts, graphitgrau metallic mit Hinterradausleger und Federeinheit
	SPR - 10 - 52 - 4L	Rahmen Spring links, bordeauxrot metallic mit Hinterradausleger und Federeinheit
	SPR - 10 - 52 - 4R	Rahmen Spring rechts, bordeauxrot metallic mit Hinterradausleger und Federeinheit
	SPR - 10 - 52 - 8L	Rahmen Spring links, graphitgrau metallic mit Hinterradausleger und Federeinheit
	SPR - 10 - 52 - 8R	Rahmen Spring rechts, graphitgrau metallic mit Hinterradausleger und Federeinheit
	SPR - 10 - 60 - 4L	Rahmen Spring links, bordeauxrot metallic mit Hinterradausleger und Federeinheit
	SPR - 10 - 60 - 4R	Rahmen Spring rechts, bordeauxrot metallic mit Hinterradausleger und Federeinheit
	SPR - 10 - 60 - 8L	Rahmen Spring links, graphitgrau metallic mit Hinterradausleger und Federeinheit
	SPR - 10 - 60 - 8R	Rahmen Spring rechts, graphitgrau metallic mit Hinterradausleger und Federeinheit

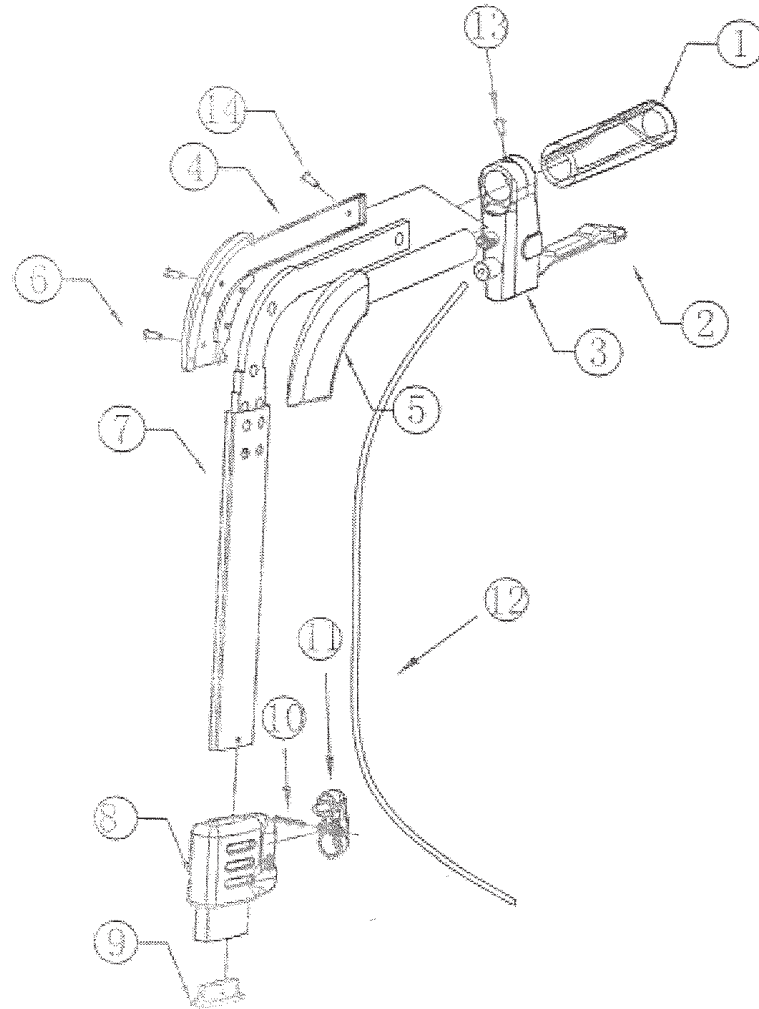


Schiebegriffe ROLLATOR SPRING

Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung
01	SPR - 31	Schiebegriffgummi beidseitig passend
02, 03, 13	SPR - 32L	Bremsgriffgehäuse mit Bremsgriff links, Umlenkrolle und Achse für Spring
02, 03, 13	SPR - 32R	Bremsgriffgehäuse mit Bremsgriff rechts, Umlenkrolle und Achse für Spring
12	SPR - 32 - 49	Bremszughülle für Spring S
12	SPR - 32 - 52	Bremszughülle für Spring M
12	SPR - 32 - 60	Bremszughülle für Spring L
	SPR - 90	Bremsinnenzug mit Endkappe für Spring/Carbon
04-07, 09, 14	SPR - 33L	Schiebegriff ohne Bremse links für Spring
04-07, 09, 14	SPR - 33R	Schiebegriff ohne Bremse rechts für Spring
08, 10, 11	SPR - 34	Höheneinstellung Schiebegriffe für Spring
o. Abb.	SPR - 33L - CC	Schiebegriff links für Spring Cross Country
o. Abb.	SPR - 33R - CC	Schiebegriff rechts für Spring Cross Country

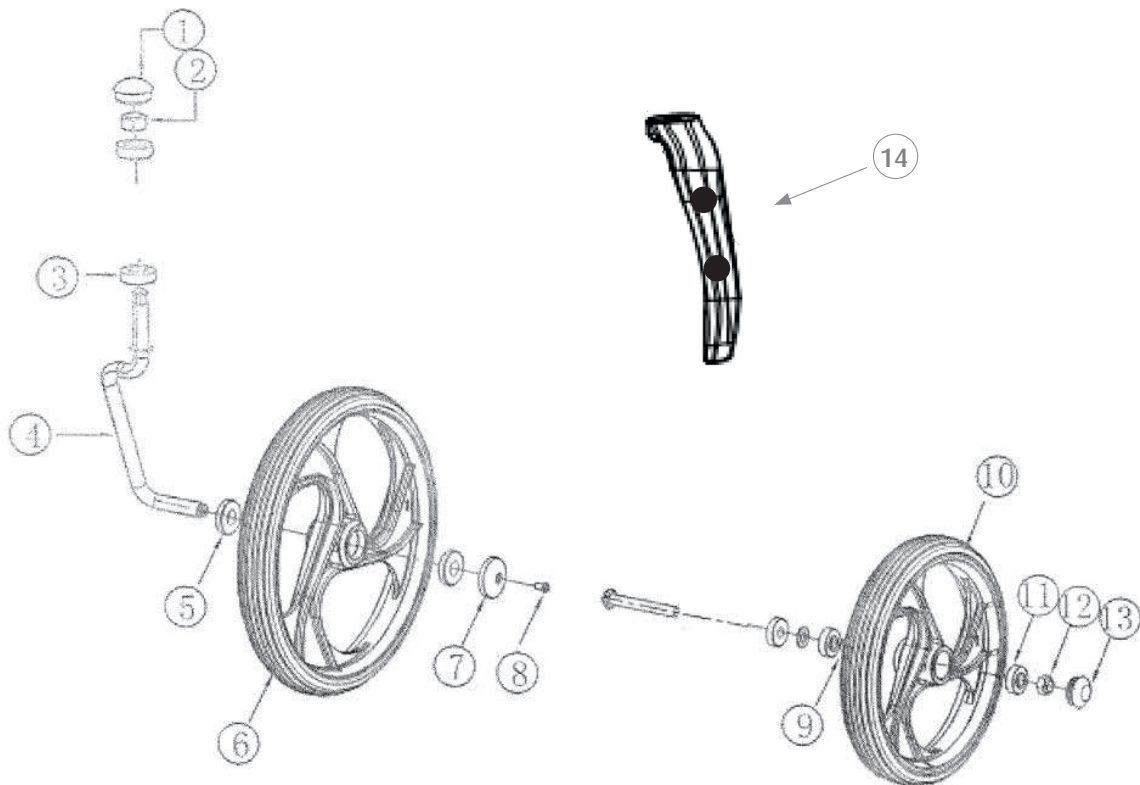


Vorder- und Hinterräder ROLLATOR SPRING

Nr.	Art. -Nr.	Beschreibung
01	SPR - 41	Staubkappe Castorbuchse für Spring (ML, MS)
13	SPR - 42	Schutzkappe Hinterrad für Spring/Carbon
6	SPR - 43	Vorderrad groß für Spring
14	CA - 1244L	Silberne Gabel links für Spring/Carbon
14	CA - 1244R	Silberne Gabel rechts für Spring/Carbon
01 - 08	SPR - 44L	Set Vorderrad links 245 mm, komplett mit Gabel schwarz
01 - 08	SPR - 44R	Set Vorderrad rechts 245 mm, komplett mit Gabel schwarz
o. Abb.	SPR - 43 - CC	Vorderrad 5-fach Speichen für Spring Cross Country
o. Abb.	SPR - 46L	Gabel links für Spring Cross Country
o. Abb.	SPR - 46R	Gabel rechts für Spring Cross Country
09 - 13	SPR - 45L	Hinterrad links komplett 200 mm für Spring/Carbon
09 - 13	SPR - 45R	Hinterrad rechts komplett 200 mm für Spring/Carbon
o. Abb.	SPR - 45 - CC	Hinterrad 5-fach Speichen für Spring Cross Country
o. Abb.	SPR - 16	Ankipphilfe links für Spring (alt)
o. Abb.	SPR - 16L	Ankipphilfe links für Spring/Carbon
o. Abb.	SPR - 16R	Ankipphilfe rechts für Spring/Carbon
o. Abb.	SPR - 16L - CC	Ankipphilfe links für Spring Cross Country
o. Abb.	SPR - 16R - CC	Ankipphilfe rechts für Spring Cross Country

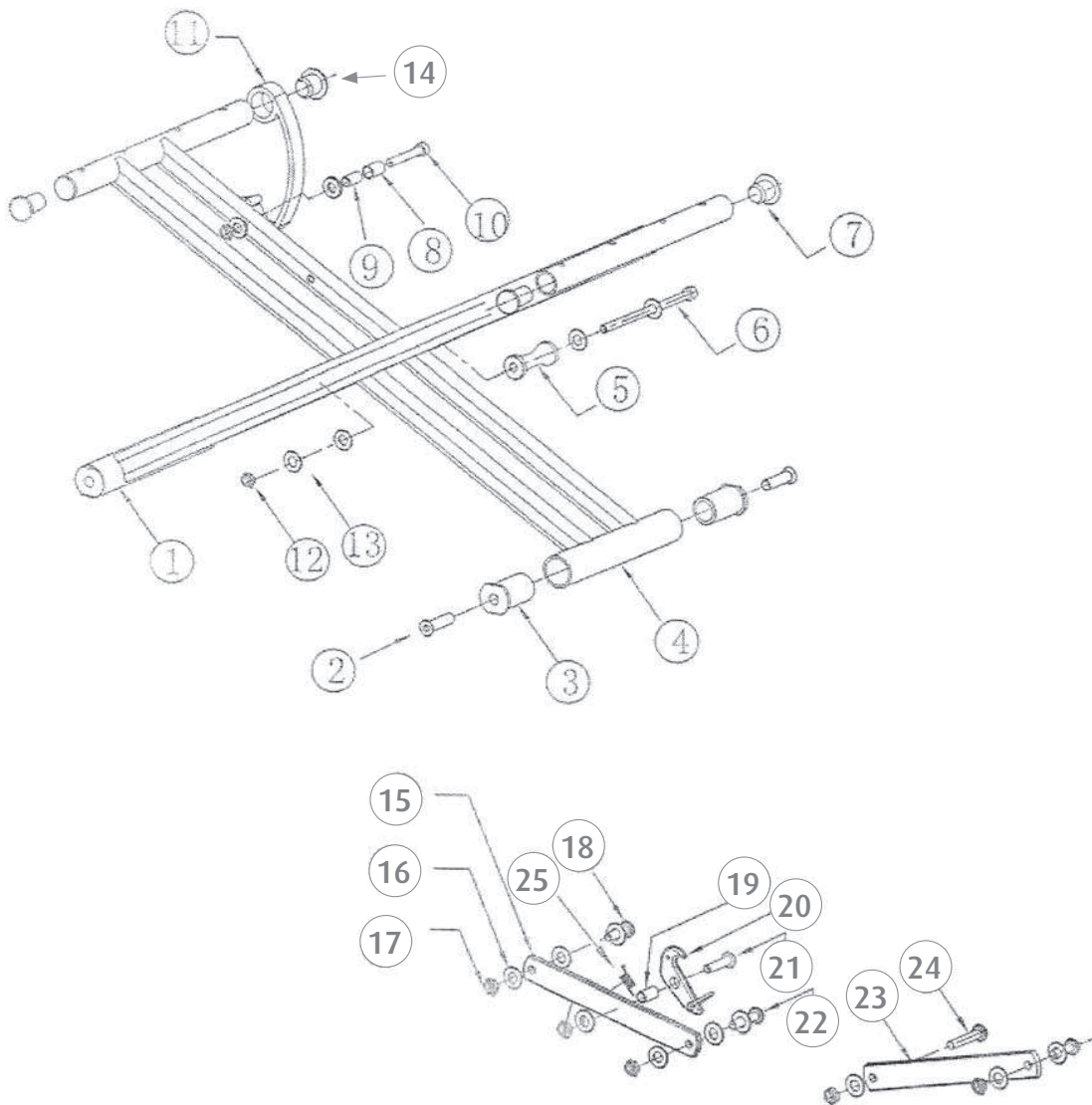

Kreuzstrebe ROLLATOR SPRING

Nr.	Art. -Nr.	Beschreibung
01-07, 12-13, 15-25	SPR-21-49	Kreuzstrebe für Spring S
01-07, 12-13, 15-25	SPR-21-52	Kreuzstrebe für Spring M
01-07, 12-13, 15-25	SPR-21-60	Kreuzstrebe für Spring L
11	SPR-22	Haltebügel rot für Spring
22-24	SPR-23	Set Schrauben Kreuzstrebe für Spring
14	SPR-24	Abdeckkappe mit Reflektor (Schere) für Spring

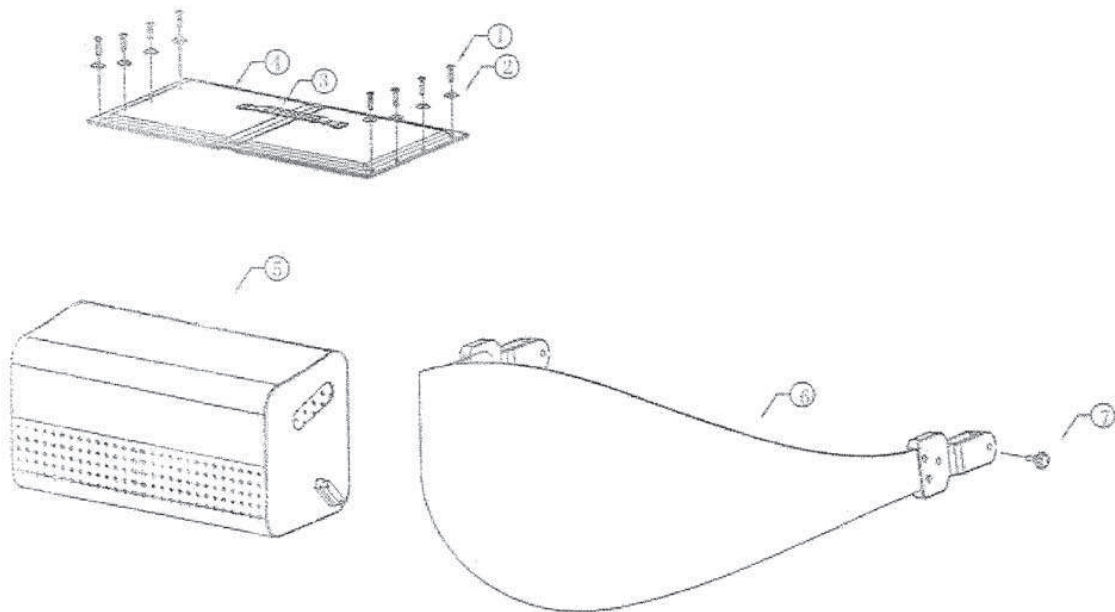

Sitzgurt und Sonstiges ROLLATOR SPRING

Nr.	Art. - Nr.	Beschreibung
01 - 02	SPR - 51	Set Schrauben und Unterlegscheiben für Spring
03	SPR - 52 - 60	Faltschlaufe für Spring/Carbon
04	SPR - 53	Sitzgurt für Spring
04	SPR - 53XL	Sitzgurt für Spring XL
06 - 07	SPR - 55	Rückengurt für Spring/Spring Cross Country/Carbon
06 - 07	SPR - 55V	Rückengurt für Spring Vario
06 - 07	SPR - 55XL	Rückengurt für Spring XL
07	SPR - 56	Schraube mit Drehknopf für Rückengurt
05	SPR - 54	Netztasche für Spring/Spring Cross Country/Carbon
05	SPR - 54XL	Netztasche für Spring XL
o. Abb.	SPR - 17C	Stockhalter mit Klickoberteil und Unterschale für Spring/Carbon
o. Abb.	SPR - 17K	Stockhalter oben „Klick“
o. Abb.	SPR - 17U	Stockhalter Unterteil
o. Abb.	SPR - 101	Halter für Rollatorschirm
o. Abb.	SPR - Vario - G	Zubehörset „Vario“ graphitgrau metallic (ein Paar Beinstützen, ein schwenkbarer Komfort-Rückengurt)
o. Abb.	SPR - Vario - R	Zubehörset „Vario“ bordeauxrot metallic (ein Paar Beinstützen, ein schwenkbarer Komfort-Rückengurt)

Zubehör ROLLATOR SPRING

Art. - Nr.	Beschreibung
RZ - 1000	Sonnen- und Regenschirm, inkl. Halterung
SPR - 101	Halter für Rollatorschirm
RZ - 1010	Getränkehalter
RZ - 1020	Namensschild aus Leder
RZ - 1021	Namensschild aus Kunstleder
RZ - 1030	Schloss, inkl. Halterung (Kabellänge: 90 cm)
RZ - v1200	LED-Beleuchtung (inkl. 3 x AAA-Batterien)
RZ - 1300	Tablett, inkl. Anti-Rutschmatte (nicht für SPRING XL erhältlich)